


もう一度、自分の足で立ち上がる!

自分の力で起立し、立位保持、車椅子へ移乗。
それら一連の動作を、手すりを「引く」という画期的な
発想から生まれた介助ポール「ラ・クリップ」がお手伝いします。
自分で立ち上がる喜びは、介護される方の
大きな自信に。前向きな気持ち生まれ、
介護する方の負担も軽減します。
お世話型の介護ではなく
自立支援型の介護へ。
「ラ・クリップ」と新しい一歩を
踏み出しましょう。



体に合わせて微調整
滑り止めのグリップボールは
位置変更が可能。
ボールのどこをつかむかの
目安にもなります。

安全な設計
一筆書きのシンプル構造は、
安心かつ安全なスタイルです。

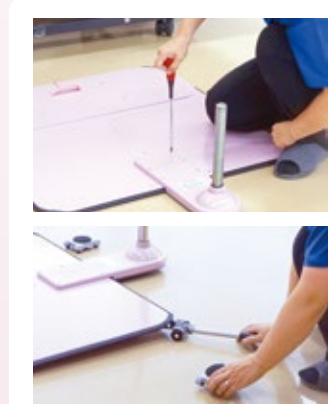

移動と設置が簡単!
付属の「らくらくヘルパー」で
移動と設置が楽にできます。



ラ・クリップの設置イメージ

ベッドの下に鋼板ベース全体が
隠れるように設置でき、滑りや
つまずきの防止になり、見た目
もすっきりします。

Point1 起き上がり・立ち上がり



体をひねりながら手前
にあるボールをつかんで横
向きになり、上半身をポー
ルに引き寄せるように起き
上がります。



右手で上のボールを持ち、
反対の手で先端をそれぞ
れつかみ、両手でボール
を引き寄せるように立ち
上がります。

**自分で立ち上がったことに
自信が持てます!**

Point3 立位保持



ポールにつかまりながら
寄りかかることで、安定
して立位を保持。衣服の
上げ下ろしなどの更衣も
行いやすくなります。

**更衣のサポートがしやすくなり
介護者の負担が軽減!**

Point2 移乗動作



ボールをつかんでいれば
方向転換がスムーズにで
きます。



車いすへの移乗の際は、
ボールをつかんだまま腰
を下ろして。立ち上がる
ときも、同様にボールを
利用できます。

**方向転換や立ち座りが
スムーズになります!**

Point4 意欲がわきます



立ちたい時に立てる喜び
や出来るが増えること
により、前向きな気持
ちになり、元気が出てき
ます。

**自分でできることが増えて
前向きな気持ちに!**




機能分析、医療・介護の現場からお墨付きをいただきました!

〈動作分析の観点から〉

立ち上がり動作を解析すると、「ラ・クリップ」のような引き型の移乗補助具では、直線的な重心移動がみられました。従来の押し型では大きく弯曲した重心移動となっており、引き型の方が**体重移動が効率的に行われる**ことが確認されました。

ラ・クリップは、押し型に比べ、
力の伝達効率、筋肉の活動性においても効率的!!

押し型と引き型の
動作分析

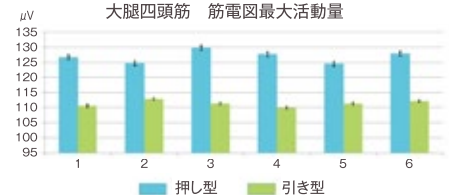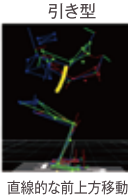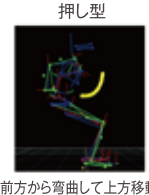

導入事例から

名古屋市立大学
整形外科
村上 英樹 教授

最初は、「ただの棒じゃないか!」と思いました。
足腰の悪い患者さんが使うと楽に立てる。楽に立てる
から立つことが嬉しくなって何度も立つ、何度も立つから
トレーニングになり意欲も出る。
介護する側も劇的に楽になる、これは優れたものですよ!

理学療法士もおすすめ!!
【プロが教える介護技術】
やしのきチャンネル



やしのきりハビリ
訪問看護ステーション
理学療法士
長谷川 陽介さん



ラ・クリップ【自立支援型移乗補助具】ラ・クリップは、ライジング エイド クリップの略称です。

鋼板ベースを
セパレートにしました!

CLIP
Rising Aid®
ラ・クリップ
■TR-0201
【サイズ】
W850×D850
×H1250ミリ

**ショート
サイズ**
■TR-0201S
【サイズ】
W850×D850
×H1100ミリ

CLIP
Rising Aid®
**ラ・クリップ
キャリアー**
■TR-0202
【サイズ】
W850×D850
×H1250ミリ

**ショート
サイズ**
■TR-0202S
【サイズ】
W850×D850
×H1100ミリ

CLIP
Rising Aid®
**ラ・クリップ
カバータイプ**
■TR-0201C
【サイズ】
W850×D850
×H1250ミリ

**ショート
サイズ**
■TR-0201CS
【サイズ】
W850×D850
×H1100ミリ

CLIP
Rising Aid®
**ラ・クリップ
カバータイプ
キャリアー**
■TR-0202C
【サイズ】
W850×D850
×H1250ミリ

**ショート
サイズ**
■TR-0202CS
【サイズ】
W850×D850
×H1100ミリ



わたしのラ・クリップ

ラ・クリップをご使用いただいているお客様から嬉しいお便りが届きました

元気になれた！ 起き上がりや立ち上がりが苦にならなくなった

今までは、ベッドの柵に掴まるとグラグラして不安定で起き上がる時が大変でした。
ラ・クリップを使うようになって、起きたり、立ったりが全く苦にならなくなり、体も楽になりました。今ではこれがないと困ります。トイレも体の調子に合わせて歩いて行けますが、ラ・クリップがなかったら、今頃は起き上がれなくなっていたと思います。頼りにしています。



Smile voice Wさんご夫婦

紙おむつが減りました！ ラ・クリップのおかげで現状維持

お箸を持って自分で食べることもできるようになり、グリップボールをつかみ、引く動作で握力がついたと感じます。立ち上がることができるようになったことで脚力がつき、階段も上がり降りできます。病気が進行しないように、自分でできることを毎日繰り返し行い、現状を維持した普通の生活ができるのは、ラ・クリップがあるから。自分でできるということは最高なんです。



ラ・クリップを使用しているIさん



Smile voice Iさんの奥様

介助量が激減!! デイサービスでラ・クリップを使っています

デイサービスでは介助量の多い方に、自立支援の目的で使っていたき、手を伸ばしてつかむ、引く、起き上がる…と少しずつできる動作が増えています。
パイプを掴む位置を移動させることができるため、立ち上がり後の重心移動が楽に行え、安心して方向転換ができるようになったと喜んでいただいております。



Smile voice デイサービス
理学療法士

ラ・クリップ®

福祉用具貸与／
介護予防福祉用具貸与 対象品




<https://keibi-group.com/ra-clip/>



製品規格一覧

型番	TR-0201	TR-0201S	TR-0202	TR-0202S	TR-0301
総重量	47.2kg	47.0kg	45.2kg	45.0kg	31.0kg
ベースサイズ 材料／重量	サイズ：W850×D850×H12.5mm 材質：冷間圧延鋼板 4.5T				
	38kg	38kg	36kg(20kg+16kg)	36kg(20kg+16kg)	25kg
ポールベース 材料／重量	サイズ：W400×D135×H300mm 材質：鋳鉄				
	7.0kg	7.0kg	7.0kg	7.0kg	3.8kg
ポールサイズ 材料／重量	材質：SUS304 パイプ Φ32 1.5T				
	1250mm	1110mm	1250mm	1110mm	1250mm
	2.2kg	2.0kg	2.2kg	2.0kg	2.2kg
グリップボール	材質：樹脂(ネジ固定) 3個				

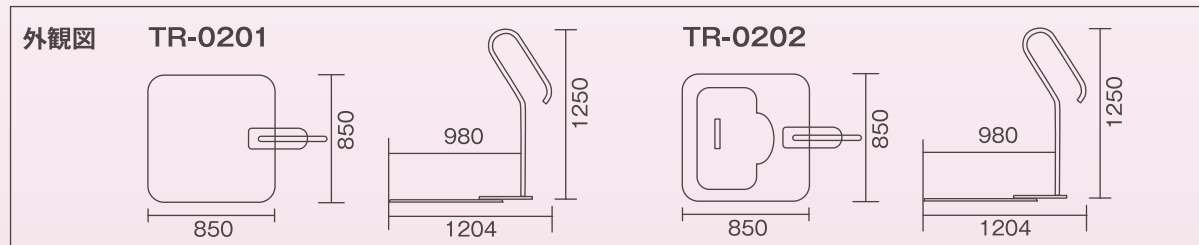

製造元

株式会社 東海技研工業

<https://keibi-group.com/>

TEL 0573-65-6888 FAX 0573-65-0162

〒508-0001 岐阜県中津川市中津川 932-325

販売元

株式会社 ハッソー

お客様窓口 フリーダイヤル ☎0120-68-8210

受付時間 平日 9時～17時

お問い合わせメールアドレス smat@k-hasso.co.jp

記載内容は、改良のため予告なく変更する場合があります。

⚠本製品の取り扱いに際しては、製品に同梱の「取扱説明書」の内容を必ず読み、よく理解してから使用してください。

Copyright© 2021 TOKAIGIKEN KOGYO CORPORATION. All rights reserved.

